

## 1. Hilfe Zecken-Set

8 teilig



Zur Zecken-Entfernung  
einfach · schnell · sicher

Inhalt:  
1 Zeckenzange  
3 Pflaster  
2 Desinfektionstücher  
2 Zeckenbehälter

Weitere Angaben: Siehe Anleitung

- die Zeckenzange greift sicher zwischen „Kopf“ und Körper der Zecke
- handlich klein, passt in jede Tasche
- 2-3 Umdrehungen - die Zecke lässt los
- oder: leicht rüttelnd, gerade herausziehen



### Hinweise zur Anwendung:

Halten Sie das Instrument locker zwischen Ihren Fingern.

Drücken Sie den Knopf der Zange und die Greifarme öffnen sich. Setzen Sie nun die Zange an der Zecke an, so nahe wie möglich an der Hautoberfläche.

Lösen Sie nun den Druck auf den Knopf, so dass die Greifarme die Zecke umschließen. Ziehen Sie die Zecke langsam, unter leichtem Rütteln gerade heraus. (Einige Fachleute raten weiterhin, die Zecke herauszudrehen. Wir empfehlen so vorzugehen, wie der Anwender persönlich am Besten damit zurecht kommt. Hauptsache, die Zecke wird so schnell wie möglich fachgerecht entfernt.)

Nachdem die Zecke erfolgreich entfernt wurde, die Stichstelle mit dem Desinfektionstuch gründlich desinfizieren und dann mit einem Pflaster überkleben.

Nun können Sie die Zecken mit 1 Tropfen Wasser in den Zeckenbehälter geben.

Der Behälter mit der Zecke kann in einem Labor auf Erreger untersucht werden. Adressen solcher Labore finden Sie im Internet, oder fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Alternativ kann die Zecke auch vernichtet werden (verbrennen) um weiteren Schaden zu vermeiden.

Suchen Sie danach zur Sicherheit Ihren Arzt auf!

